

## Gebrauchsanweisung

### *Befeuchtet und erfrischt strapazierte Augen.*

**Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von harten und weichen Kontaktlinsen.**

# Herba-Vision®

## *Blaubeere*

mit Hyaluronat

15 ml Augentropfen (Musterpackung: 5 ml)

Benetzungslösung für das Auge mit 0,05 % Blaubeertinktur, hergestellt gemäß HAB 2000, und mit der körpereigenen benetzenden Substanz Natrium-Hyaluronat.

Herba-Vision® Blaubeere Augentropfen befeuchten und erfrischen müde, strapazierte Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, den Aufenthalt in verrauchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

### **Zusammensetzung:**

1 ml isotonische Pufferlösung enthält

0,5 mg Natrium-Hyaluronat

0,5 mg Blaubeertinktur (HAB 2000)

0,001 mg Polyhexanid

0,1 mg EDTA

2,5 mg HPMC (Methocel®)

Medizinprodukt

CE 0473

### **Anwendung:**

Bei Bedarf 1–2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

### **Hinweise:**

Kühl und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem Öffnen zwei Monate haltbar. Nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums anwenden.

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

Lösung nicht einnehmen. Tropferspitze nicht berühren. Nach Gebrauch verschließen. Immer frische Lösung verwenden. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden Beschwerden einen Facharzt/ Spezialisten aufsuchen.

### **Stand der Information:**

September 2009



OmniVision GmbH  
Lindberghstraße 7  
D-82178 Puchheim