

Gebrauchsanweisung

Benetzende Augentropfen mit Hyaluronsäure – natürliche Befeuchtung: wohltuend und langanhaltend

Hyo-Vision® HD

15 ml Augentropfen (Musterpackung: 5 ml)
Natriumhyaluronat 0,1 %

Anwendung:

- Schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig.
- Zur Linderung bei Trockenheitsgefühl und bei leichter, nicht als pathologisch einzustufender Reizung durch umgebungsbedingte Befindlichkeitsstörungen des Auges wie z. B. Brennen, Ermüdung, langes Arbeiten vor dem Bildschirm oder Tragen von Kontaktlinsen.
- Geeignet für Kontaktlinsen jeden Typs.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln:

Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln oder anderen Produkten, welche auf das Auge aufgetragen werden, anwenden, da Hyo-Vision® HD deren Wirkung verändern kann.

Produktbeschreibung:

Hyo-Vision® HD 15 ml Augentropfen enthalten 0,1 % hochgereinigtes Natriumhyaluronat in Phosphat-gepufferter Kochsalzlösung mit Polyhexanid, einem sanften Konservierungsmittel. Natriumhyaluronat ist eine natürliche Substanz, die auch im menschlichen Auge vorkommt. Das eingesetzte Natriumhyaluronat ist nicht tierischen Ursprungs, sondern wird fermentativ gewonnen. Der Ophtiolieninhalt wurde durch Filtration sterilisiert; die Keimfreiheit ist nur bei unversehrter Ophtiole gewährleistet.

Zusammensetzung:

1 ml Lösung enthält 1 mg hochgereinigtes Natriumhyaluronat, 0,0015 mg Polyhexanid (PHMB), 0,1 mg Natriumedetat (EDTA), isotonischen Phosphatpuffer, gereinigtes Wasser.

Dosierung:

Bei Bedarf 1–2 Tropfen Hyo-Vision® HD in den Bindehautsack einträufeln.

Gebrauchshinweise:

- Hände sorgfältig waschen und abtrocknen.
- Ophtiole auf ihre Unversehrtheit prüfen, um sicherzustellen, dass der Inhalt keimfrei ist.
- Zum Öffnen Schraubverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Brechen des Sicherheitsverschlusses drehen.
- Ophtiole mit der Öffnung nach unten halten und pro Auge je 1–2 Tropfen einträufeln. Durch Lidschlag wird die Lösung verteilt und bildet eine transparente Flüssigkeitsschicht auf der Augenoberfläche. Achten Sie darauf, dass das Auge nicht mit der Ophtiole in Berührung kommt, um Verletzungen oder Infektionen zu vermeiden.
- Die Augentropfen können zusammen mit Kontaktlinsen jeden Typs verwendet werden. Für Erwachsene und Kinder geeignet.

Lagerung:

Bei Temperaturen von 2–25 °C. Nicht gefrieren lassen. Nach Öffnung 3 Monate haltbar. Vor Licht- bzw. Sonneneinstrahlung schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Aufbewahrung des Präparates:

Die Lösung soll nach Ablauf des auf der Verpackung genannten Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. Zu beachten: Nicht verwenden, wenn die Ophtiole beschädigt ist. Nicht verwenden, wenn die Flüssigkeit trüb ist oder eine Färbung aufweist. Das Auge nicht mit der Ophtiole berühren. Bei Nebenwirkungen jeglicher Art fachärztlichen Rat einholen.

Stand der Gebrauchsinformation:

Februar 2012

Medizinprodukt

CE 0473



Hersteller:

OmniVision GmbH
Lindberghstraße 7
82178 Puchheim
Deutschland
Telefon +49 (0)89-84 07 92-30
Telefax +49 (0)89-84 07 92-40
www.omnivision.de
info@omnivision.de

Vertrieb:

OmniVision Ges.m.b.H.
Eichenstraße 32
1120 Wien
Österreich
Telefon +43 (0)1 81358-82
Telefax +43 (0)1 81358-63
www.omnivision.at
info@omnivision.at