

# GOUTTES BLEUES

**Sterile Augenlotion zur Befeuchtung der Augen**

**Für entspannte, strahlende Augen**

## Was sind beanspruchte Augen?



Beanspruchte oder müde Augen können nach intensiven oder langen Zeitspannen visueller Arbeit auftreten. Beanspruchte Augen haben vielfältige Symptome: Kratzen, Brennen, Jucken, Rötung, Schmerzen und Kopfschmerzen am Ende des Tages. **Opticalm Gouttes Bleues** kann durch seine physikalische Wirkung die Symptome angespannter Augen lindern, da es die Hornhaut befeuchtet und die Augenrötung mindert.

**Opticalm Gouttes Bleues** enthält destillierte Pflanzenextrakte (Kornblumen-, Steinklee-, Holunder-, Kamillen- und Hamameliswasser). Es lindert die Symptome beanspruchter Augen und sorgt dafür, dass Ihre Augen wieder strahlen.

## Anwendungshinweise:

Zum Öffnen der Flasche

- 1** Ziehen Sie das Sicherheitsiegel ab
- 2** Entfernen Sie die weiße Spitze
- 3** Halten Sie die Flasche aufrecht
- 4** Drücken Sie den Tropfer

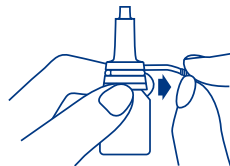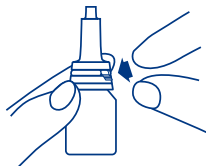

## Anwendungsempfehlung:

Waschen Sie Ihre Hände vor dem Gebrauch. Öffnen Sie das Augenlid, bis die Pupille vollständig sichtbar ist, und platzieren Sie 1 bis 2 Tropfen in den Augwinkel. Stellen Sie sicher, dass die Flaschenspitze nicht Ihre Augen berührt. Es ist empfehlenswert, Ihre Kleidung vor Kontakt mit **Opticalm Gouttes Bleues** zu schützen.

## Vorsichtsmaßnahmen:

Darf nicht bei Kindern und Heranwachsenden unter 15 Jahren angewendet werden. Muss innerhalb von 28 Tagen nach Anbruch verbraucht werden. Aus hygienischen Gründen sollte jede Flasche nur individuell verwendet und nicht mit anderen Personen geteilt werden. Kontaktlinsenträger: Entfernen Sie die Kontaktlinse vor dem Gebrauch und warten Sie nach der Anwendung 15 Minuten, bevor Sie diese wieder einsetzen. Ohne professionelle augenärztliche Aufsicht nicht länger als einen Monat täglich anwenden. Wenn die Symptome beanspruchter Augen anhalten, bitte einen Arzt hinzuziehen.

Im Falle einer Überdosierung Auge mit klarem Wasser spülen. Bewahren Sie das Produkt zusammen mit dieser Gebrauchsanweisung in dessen Verpackung, bei Raumtemperatur und lichtgeschützt auf.

## Gegenanzeigen:

Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist. Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden.

Nach Augenoperationen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. **Opticalm Gouttes Bleues** ist nur zur Behandlung trockener, geröteter Augen geeignet, es kann nicht die Grunderkrankung selbst heilen.

Nicht ohne ärztlichen Rat zusammen mit anderen Augenpräparaten verwenden.



Vor der Anwendung Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.



Lichtgeschützt aufbewahren



Verwendbar bis (YYYY-MM)



Zur Anwendung im Auge

**STERILE A** Sterilfiltration

**LOT** Chargenbezeichnung

**28D** Nach dem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**OPTICALM GOUTTES BLEUES**, sterile Augenlotion zur Befeuchtung der Augen, ist ein Medizinprodukt entsprechend der Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/CEE

Letzte Überarbeitung: Juli 2012

DR/NGB/nv Edliée: 2.0

**CE 0120**

**Hersteller:**  
Laboratoires Omega Pharma France  
Division des dispositifs médicaux  
20 rue André Gide FR – 92 Châtillon

**Vertrieb DE:** Deutsche Chefaro Pharma GmbH  
D-40476 Düsseldorf - Deutschland

**Vertrieb AT:** Richard Bittner AG - Reinerstraße 55-57  
1030 Wien - Österreich  
www.opticalm.com