

# *Verbesserte Befeuchtung, Erfrischung & Schutz der Augenoberfläche.*

## **Gebrauchsanweisung**

### **Pan-Vision®**

Sterile Lösung mit Hypromellose und Dexpanthenol zur verbesserten Befeuchtung, Erfrischung und Schutz der Augenoberfläche.

#### **Beschreibung**

Pan-Vision® ist eine sterile wässrige Lösung mit 0,3% Hypromellose und Dexpanthenol zur Benetzung der Augenoberfläche. Zur Gesunderhaltung und optimalen Funktion des Auges müssen Bindehaut und Hornhaut ständig feucht gehalten werden. Nur so können lästige Beschwerden verhindert werden. Pan-Vision® hat physikalisch-epithelprotektive, befeuchtende und pflegende Eigenschaften. Es beseitigt Trockenheitsgefühl und leichte Reizungen der Augen aufgrund von Umwelteinflüssen, wie z. B. durch Klimaanlage, Staub und Belastung durch Sonneneinstrahlung oder bei Müdigkeit und langer Bildschirmarbeit.

Pan-Vision® hat folgende chemisch-physikalische Eigenschaften: es enthält eine klare Flüssigkeit, die zu allen Teilen wasserlöslich ist. Es entstehen keine Ausfällungen an metallischen Salzen oder organischen Residuen, die möglicherweise in die körpereigene Tränenflüssigkeit gelangen können. Der pH-Wert ist perfekt kompatibel mit dem Augengewebe und der Tränenflüssigkeit. Daher ist Pan-Vision® besonders gut verträglich und beseitigt rasch lästiges Trockenheitsgefühl. Darüber hinaus enthält Pan-Vision® Dexpanthenol, das sowohl physikalisch-epithelprotektive als auch pflegende Eigenschaften besitzt. Die befeuchtenden Eigenschaften der Hypromellose werden hierdurch sinnvoll unterstützt.

#### **Zusammensetzung**

Hypromellose 0,3%, Dexpanthenol, Cetrimid 0,010%, Dinatriumedetat, Natriummonohydrogenphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

#### **Gebrauchshinweise**

Drücken Sie das Fläschchen leicht zusammen und tropfen Sie 1–2 Tropfen in den unteren Bindehautsack. Falls erforderlich, können Sie mehrmals am Tag nachtropfen.



OmniVision GmbH, Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim

### **Vorsichtsmaßnahmen**

- Verwenden Sie Pan-Vision® nicht während des Tragens von weichen Kontaktlinsen. Falls die Anwendung zusammen mit weichen Kontaktlinsen aus medizinischen Gründen notwendig ist, warten Sie bitte mindestens 15 Minuten bis zum Wiedereinsetzen der Kontaktlinsen.
- Die Tropferspitze nicht berühren.
- Verwenden Sie Pan-Vision® nicht bei Augenentzündungen.
- Verwenden Sie Pan-Vision® nicht zusammen mit anderen Präparaten zur äußerlichen Anwendung am Auge.
- Bei bekannten Unverträglichkeiten gegenüber einem der Inhaltsstoffe wenden Sie Pan-Vision® bitte nicht an.
- Benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- 30 Tage nach Anbruch sollten Sie die Tropfen nicht mehr verwenden.

### **Aufbewahrung**

Pan-Vision® Augentropfen sollten nicht bei Temperaturen über 25 °C aufbewahrt werden. Vor Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.

### **Warnhinweis**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### **Packungsgröße**

Tropfflasche mit 10 ml Lösung.

Medizinprodukt

### **Stand der Gebrauchsinformation**

Juni 2015

### **Hersteller**

Bruschettini s.r.l.  
Genua, Italien

### **Vertrieb**

OmniVision GmbH, Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim, Deutschland  
Telefon +49 (0)89 840792-30, Telefax +49 (0)89 840792-40  
[www.omnivision.de](http://www.omnivision.de), [info@omnivision.de](mailto:info@omnivision.de)

OmniVision GmbH, Anton Anderer Platz 6, 1210 Wien, Österreich

**CE**  
**0373**  
**STERILE A**



OmniVision GmbH, Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim