


## Anschluss einer neuen Manschette an Ihrem Blutdruckmessgerät

Diese Information gilt für alle boso Blutdruckmessgeräte folgender Modelle.

- boso medicus
- boso medicus uno
- boso medicus control
- boso medicus family
- boso medicus prestige

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,  
bitte beachten Sie den folgenden Hinweis zum Anschluss der neuen Manschette  
um die einwandfreie Funktion ihres Blutdruckmessgerätes sicherzustellen.

Der Anschlussstecker ihrer neuen Manschette ist etwas länger als derjenige ihrer  
alten Manschette.

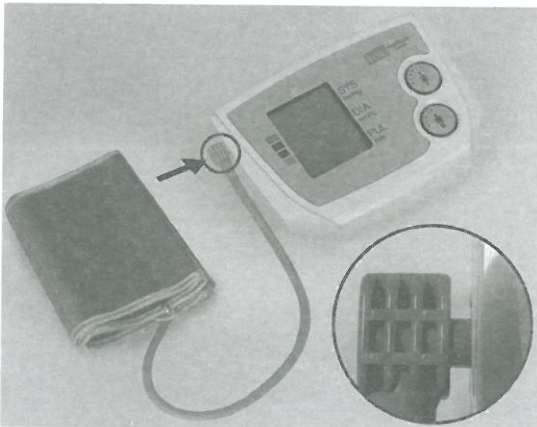

Pressen Sie den Anschluss-  
stecker deshalb nicht bündig  
bis zum Anschlag, sondern  
nur bis zum Einrasten ein.  
In der korrekten Position hat  
der Stecker einen Abstand  
von 3 - 4 mm zum Gehäuse.  
( siehe Abbildung )