

Zahnaufhellungs-Kit für sofortige Ergebnisse

iWHITE
instant teeth whitening

Instant

WAS IST IWHITE INSTANT?

iWhite Instant ist ein einfach anzuwendendes, für die Zähne unbedenkliches und sofort aufhellendes Produkt.

Diese Anwendung für zu Hause nimmt nur 20 Minuten am Tag in Anspruch und führt zu sofort sichtbaren Resultaten - bis zu 8 Nuancen weißere Zähne. Für noch bessere Ergebnisse kann das Produkt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen verwendet werden. Man kann es auch von Zeit zu Zeit verwenden, wann immer man es als notwendig erachtet. Die hygienisch verpackten Schienen in Einheitsgröße sind mit aktivem Gel befüllt. Eine Packung enthält 10 gebrauchsfertig befüllte Schienen. Verwenden Sie eine Schiene für die Zähne des Ober- und eine für die Zähne des Unterkiefers.

Das Besondere an iWhite Instant ist:

- Es **HELLT SOFORT AUF** und **ENTFERNT AKTIV FLECKEN**: dank der einzigartigen kristallbildenden Kalzium-Technologie erzielt dieses **innovative System zur Zahnaufhellung in einem Schritt** einen unmittelbaren, natürlich aufhellenden Effekt - bis zu 8 Nuancen weißer.
- Es liefert eine hoch lösliche Quelle an Kalzium wodurch es den Zahnschmelz **STÄRKT**.
- Es benötigt nur **EINEN SCHRITT**: kein Reinigen oder Abkochen von Mundstücken notwendig, kein umständliches Hantieren mit Spritzen oder Pinsel und kein Gel abmessen.
- Die Schienen sind so designt, dass sie sowohl die **VORDER-** als auch die **RÜCKSEITE** der **ZÄHNE AUFHELLEN**. Dies ist wichtig, da Zähne lichtdurchlässig sind und Flecken auf der Zahnrückseite durchscheinen können.
- Die Schienen sind **EINFACH ZU TRAGEN UND ANZUWENDEN**: sie haben eine Einheitsgröße, sind weich und flexibel.
- Es ist kein Anmischen notwendig: jede Schiene ist bereits mit der passenden Menge aufhellendem Gel befüllt, die so berechnet ist, dass sie Reizungen vorbeugt.
- **Verträglichkeit und Wirksamkeit** wissenschaftlich geprüft.

VERWENDUNGSZWECK

iWhite Instant Schienen sind in folgenden Fällen anzuwenden:

- Bei Verfärbung der Zähne, bei Bildung von Zahnbelag, bei Rauchern, bei Konsum von Lebensmitteln und Getränken wie z.B. Rotwein, Kaffee, etc.
- Bei Verfärbung vom Zahnschmelz wo die Zähne beschädigt worden sind, z.B. als Resultat von mechanischen Verfärbungen.

WIE IST IWHITE INSTANT ANZUWENDEN?



1. Putzen Sie vor jeder Anwendung sanft Ihre Zähne.




2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände sauber und trocken sind.



3. Entnehmen Sie die befüllte Schiene aus dem versiegelten Sacht und platzieren Sie sie direkt in Ihren Mund. Achten Sie darauf, dass das Gel in Kontakt mit der Zahnoberfläche ist. Die Zähne des Ober- und Unterkiefers können zeitgleich aufgehellt werden.



4. Schließen Sie behutsam Ihre Lippen um die Schiene und anschließend Ihren Mund. Beachten Sie: zu festes Zubeißen kann dazu führen, dass überschüssiges Gel aus der Schiene herausquillt, weg von den Zähnen.

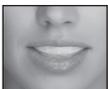

5. Entfernen Sie die Schiene nach 20 Minuten und entsorgen Sie sie umgehend. Spülen Sie das übrig gebliebene Gel von Zähnen und Zahnfleisch leicht mit Wasser weg.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Während Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.
- Für Kinder unter 14 Jahren nicht empfohlen.
- Vermeiden Sie es, das Gel zu schlucken.
- Hellt nur natürliche Zähne auf. Füllungen, Kronen und Veneers werden von dem Produkt nicht beeinflusst.
- Das Produkt darf nicht angewendet werden beim Tragen von Zahnsparangen, Retainern, Zahnschmelz und/oder Piercings.
- Wenden Sie das Produkt nicht an, wenn Sie unter Zahnfleischproblemen leiden. Setzen Sie die Behandlung aus, wenn Sie Schmerzen oder Überempfindlichkeit wahrnehmen; wenn nötig kontaktieren Sie einen Apotheker.
- Wenden Sie das Produkt nicht innerhalb von zwei Wochen nach zahnärztlichen und/oder kieferorthopädischen Behandlungen (Füllungen, Kronen, Implantate,...) an.
- Wenden Sie das Produkt nicht im Liegen an.
- Die Anwendung des Produkts wird nicht empfohlen bei Unverträglichkeit oder allergischen Reaktionen auf einzelne Inhaltsstoffe.
- Nicht empfohlen für längeren Kontakt mit der Haut.
- Sollte das Produkt mit den Augen in Kontakt kommen, gründlich mit Wasser ausspülen.
- Vermeiden Sie, das Produkt mit Kleidung in Berührung zu bringen.
- Jede befüllte Schiene ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Einzelne Schienen, deren Verpackung beschädigt war, sollten nicht mehr verwendet werden.
- Sobald die Verpackung einer einzelnen Schiene geöffnet wurde, muss das Produkt innerhalb von 30 Minuten angewendet werden.
- Um optimale Resultate zu erzielen, vermeiden Sie den Konsum säurehaltiger Lebensmittel und Getränke wie z.B. Limonade, Cola, etc. sowie Tabak, Kaffee, Rotwein, Fruchtsaft und andere färbende Substanzen während der Behandlungsperiode.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihren Zahnarzt alle sechs Monate aufzusuchen für eine gesunde Zahnhygiene.
- Kühl und trocken zwischen 2°C und 25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Hersteller:

Sylphar NV – Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle - Belgien
www.iwhiteinstant.com

Vertrieb in Deutschland:

HERMES ARZNEIMITTEL GmbH
Georg-Kalb-Strasse 5-8
82049 Großhesselohe / München
Tel: (089)79102-0
info@hermes-arzneimittel.com

Ingredients: Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Phthalimido-peroxy-caproic Acid, Sorbitol, Chondrus Crispus Powder/ Hydrated Silica, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Acrylates/Acrylamide Copolymer and Mineral Oil and Polysorbate 85, Citric Acid, Methyl Paraben, Calcium lactate gluconate, BHT, Xylitol, Potassium Acesulfame

Inhalt:

10 x 0,8 g = 8,0 g