


GYNELLA® AtroGel

ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG VAGINALER TROCKENHEIT UND ATROPHIE

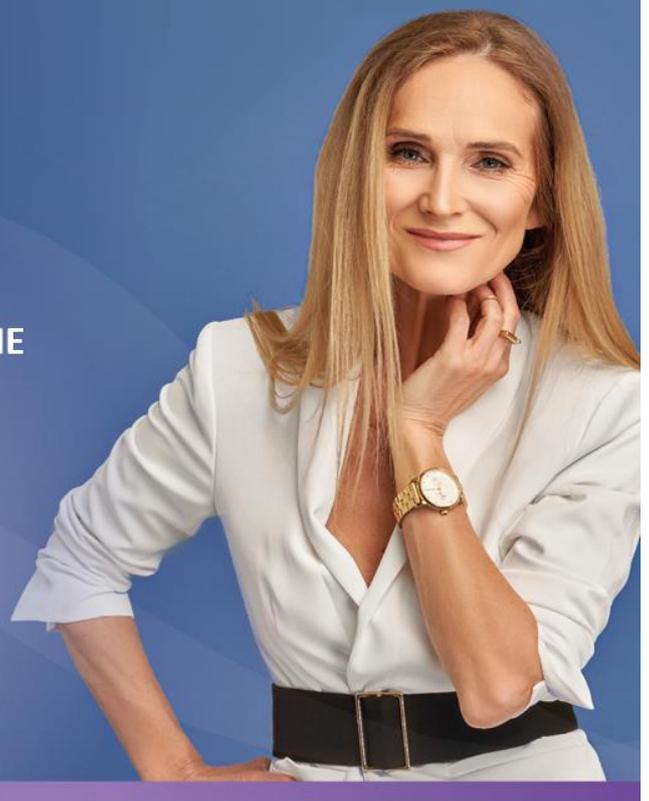

Medizinprodukt, PZN 16790004. Rezeptfrei

Medizinprodukt zur Vorbeugung und Behandlung vaginaler Trockenheit und Atrophie.

Verwendungszweck: Das Medizinprodukt Vaginalgel mit Hyaluronsäure ist zur Vorbeugung und Behandlung vaginaler Trockenheit und Atrophie sowie bei Vaginitis und Vaginose angezeigt. Hyaluronsäure ist ein hochlösliches, nicht sulfatiertes Glycosaminoglycan mit sehr hohem Molekulargewicht. Hyaluronsäure garantiert dank ihrer muco-mimetischen, viskoelastischen, hydratisierenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften eine ausreichende Befeuchtung der Vaginalschleimhaut. Vaginalgel mit Hyaluronsäure hat eine wirksame Barrierewirkung, die zur Reparatur der mit Scheidentrockenheit einhergehenden Läsionen beiträgt und die Wiederherstellung des physiologischen Zustands der Schleimhaut begünstigt.

Gebrauchsanweisung: 1. Waschen Sie vor dem Gebrauch gründlich Ihre Hände, reinigen Sie den zu behandelnden Bereich und lassen Sie ihn gründlich trocknen. 2. Entfernen Sie vor Gebrauch die Kappe von der Kanüle. 3. Führen Sie den Applikator so tief wie möglich in die Vagina ein (es ist ratsam, sich hinzulegen) und lassen Sie den Inhalt in die Vagina eindringen. 4. Nach Gebrauch den Applikator entsorgen. Wiederholen Sie die Anwendung für 7 Tage, einmal im Monat.

Warnhinweise: • Das Produkt besteht aus 7 Einweg-Applikatoren für einzelne vaginale Anwendungen. • Ein einmal aufgetragenes Produkt nicht wiederverwenden. • Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die in der Packungsbeilage angegebenen Zwecke. • Waschen Sie Ihre Hände gründlich vor jeder Anwendung.

• Vor jeder Anwendung den vaginalen Bereich sorgfältig reinigen. • Vor Wärmequellen schützen. • Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfallsdatums. • Nicht oral anwenden. • Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. • Unterbrechen Sie die Behandlung bei abnormalen Hautreaktionen. • Konsultieren Sie bei längerer Anwendung Ihren Arzt.

Gegenanzeigen: Keine bekannten Überdosierungseffekte. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen eine oder mehrere Komponenten.

Zusammensetzung: Aqua, Propylenglykol, Glycerin, TIAB®, Benzylalkohol, Natriumpolyacrylat, Genistein, Harnstoff, Trehalose, Natriumhyaluronat, Dehydroessigsäure, Pentylenglykol, Serin, Algin, Caprylylglykol, Glycerylpolyacrylat, Dinatriumphosphat, Pullulan, Kaliumphosphat.

Lagerbedingungen: Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Licht aufbewahren. Wenn der Inhalt dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann er eine leicht gelbe Färbung annehmen. Dies wirkt sich nicht auf die Funktionalität und die Eigenschaften aus.

Verpackung: 7 x 5g Einweg-Vaginalapplikatoren.

Letzte Revision: März 2020.

Hersteller: NTC s.r.l. Via Luigi Razza 3, 20124 Mailand, Italien.

Vertrieb: HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, Prag 4, Tschechische Republik.

