

AUGEN PFLEGER

Lidreinigungstücher

20 sterile gebrauchsfertige Einwegtücher zur täglichen Behandlung der Augenpartie bei z.B. Blepharitis bei Erwachsenen und Kindern.

ANWENDUNGSGEBIETE

Artelac® Augenpfleger wird angewendet zur äußerlichen Behandlung der Augenlider und Wimpern bei Erwachsenen und Kindern (ab 36 Monaten), auch bei Ablagerungen bzw. Sekreten aufgrund von Allergien, Entzündungen und/oder Infektionen wie z. B. verschiedenen Arten von Blepharitis und Blepharokonjunktivitis. Das Produkt ist insbesondere zur Behandlung vor und/oder nach einer Augenoperation geeignet. Artelac® Augenpfleger wird außerdem empfohlen für die tägliche Behandlung der Augenpartie bei Personen mit Neigung zum Auftreten verschiedener Arten von Blepharitis und Blepharokonjunktivitis. Aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung sind die Tücher auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Alle aufeinander abgestimmten Komponenten von Artelac Augenpfleger (Aloe, Hyaluronsäure, Allantoin, Chlorhexidin) tragen zur gründlichen Behandlung bei und beachten die besondere Beschaffenheit der Augenpartie, die äußerst zart und empfindlich ist.

Das Produkt ermöglicht das gründliche mechanische Entfernen von Ablagerungen bzw. Sekreten, Fremdkörpern, Staub und Pollen.

Artelac® Augenpfleger enthält keine Konservierungsmittel und keine zusätzlichen Duftstoffe.

ZUSAMMENSETZUNG

Weiches Tuch, getränkt mit folgender Lösung: Wasser, Polysorbat 20, Natriumhyaluronat, Dinatrium-EDTA, Trinatriumcitrat-Dihydrat, Aloe-vera-Gelpulver, Glycerol, Chlorhexidindigluconat, Zitronensäure-Monohydrat, Allantoin, Natrium-Hydroxymethylglycinat

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Waschen Sie gründlich Ihre Hände, öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie das Tuch.
- Wenden Sie das Tuch im Augenlidbereich an und wischen Sie ihn vorsichtig ab, um den Bereich zweckmäßig zu säubern und Sekrete der Augen und andere Ablagerungen (Smog, Schwebstoffe, Staub usw.) zu entfernen.
- Bei besonders hartnäckigen Ablagerungen bzw. Sekreten oder Verschluss eines Tränenkanals wird empfohlen, den geschlossenen Beutel ein paar Minuten in lauwarmem Wasser (ca. 40 °C) zu erwärmen und das Tuch dann als Wärmekompressen anzuwenden und den Bereich sanft zu massieren.
- Bei einer Entzündung wird hingegen empfohlen, den Beutel einige Stunden im Kühlschrank zu kühlen und dann das ausgepackte Tuch auf das Auge zu legen und als Kaltkompressen einige Minuten dort zu belassen.

WARNHINWEISE

- Die Sterilität des Produkts ist nur bei unversehrtem Beutel garantiert.
- Das Tuch ist zur einmaligen Anwendung bestimmt. Die wiederholte Anwendung kann zum Ausbreiten von Infektionen führen.
- Kühl und trocken lagern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Zur äußeren Anwendung.
- Behandlung bei sichtbarer Irritation oder Überempfindlichkeit gegen das Produkt abbrechen.
- Bei einer Infektion nicht dasselbe Tuch für beide Augen verwenden.
- Einwegprodukt.
- Anleitung sorgfältig lesen.

Schwerwiegende Vorkommnisse in Verbindung mit dem von uns bereitgestellten Medizinprodukt müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats gemeldet werden, in dem sie aufgetreten sind.

 **Promeia Italia Srl**
MIND Viale Decumano, 36
20157 Milano (MI), Italy
www.promeia.com



Dr. Gerhard Mann
chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin, Deutschland

Rev 01 – 04/2024
P1DEAT01

CE 0425



     Verpackung umweltschonend in dafür
vorgesehene Abfallbehältnisse entsorgen

Abfälle entsorgen
Schachtel / Papier



Anleitung / Papier



Beutel / Kunststoff

