

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig – sie wird Ihnen helfen, die Augentropfen richtig anzuwenden.



SafeDrop® Daily

Sterile Natriumhyaluronat-Lösung (0,1 %)

Benetzende Augentropfen mit Hyaluronsäure zur Befeuchtung der Augenoberfläche.

Zur Linderung und Beruhigung der Symptome bei leichten Reizungen, Trockenheitsgefühl und umgebungsbedingten Befindlichkeitsstörungen des Auges wie z. B. Brennen, Tränen und Sandkorngefühl.

Sterile, phosphatfreie Lösung ohne Konservierungsmittel.

Wohltuend, gut verträglich und langanhaltend. Für weiche und harte Kontaktlinsen geeignet.

Was ist Hylo-Vision® SafeDrop® Daily?

Hylo-Vision® SafeDrop® Daily ist ein steriles, phosphatfreies und mittelviskoses Benetzungsmittel das langkettige Hyaluronsäure zur Befeuchtung der Augenoberfläche enthält. Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die auch in Strukturen des menschlichen Auges und im Tränenfilm vorkommt, und dadurch besonders gut verträglich ist. Sie zeichnet sich durch ein hohes Wasserbindungsvermögen aus, haftet gut auf der Augenoberfläche (mucoadhäsive Eigenschaften) und ist viskoelastisch. Somit befeuchtet und benetzt Hylo-Vision® SafeDrop® Daily die Oberfläche des Auges. Hylo-Vision® SafeDrop® Daily ist zur Benetzung von Kontaktlinsen gut geeignet. Dadurch wird der Tragekomfort der Kontaktlinsen deutlich verbessert. Dank des innovativen SafeDrop®-Systems, einem von OmniVision mitentwickelten konservierungsmittelfreien Mehrdosenbehältnisses und der praktischen breiten Fingerauflage kann Hylo-Vision® SafeDrop® Daily optimal angewendet werden.

Wofür wird Hylo-Vision® SafeDrop® Daily angewendet?

Augentropfen zur Linderung der Symptome trockener Augen mit Hyaluronsäure. Dank der befeuchtenden und benetzenden Eigenschaften der Hyaluronsäure wird die Augenoberfläche beruhigt. Das Produkt ist für die Anwendung durch Laien bestimmt.

Klinischer Nutzen von Hylo-Vision® SafeDrop® Daily

Dank der tränenähnlichen isotonischen Formulierung der Augentropfen, in Verbindung mit der wasserbindenden Eigenschaft der Hyaluronsäure, lindert Hylo-Vision® SafeDrop® Daily die klinischen Symptome, die durch gereizte oder trockene Augen verursacht werden, und fördert so den Komfort der Augen des Anwenders. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Produktes werden die Symptome gereizter oder trockener Augen klinisch relevant besser bewertet als zu Beginn der Anwendung.

Zusammensetzung

Hochgereinigtes Natriumhyaluronat (0,1%), Sorbitol, Natriumchlorid, Natriumcitrat/Zitronensäure (Puffer), gereinigtes Wasser.

Hylo-Vision® SafeDrop® Daily findet Anwendung zur Linderung der Symptome von trockenen oder gereizten Augen verursacht durch:

- Umweltstress, z.B. durch Klimaanlagen, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettentrauch
- Müdigkeit und Sehstress durch intensives Sehen, z.B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder langen Autofahrten
- mechanische Beanspruchung, z.B. durch das Tragen von Kontaktlinsen.

Wann sollte man Hylo-Vision® SafeDrop® Daily nicht anwenden?

- Bei einer bestehenden Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Für wen ist Hylo-Vision® SafeDrop® Daily geeignet?

- Geeignet zur Anwendung bei Jugendlichen (ab 16 Jahren) und Erwachsenen.
- Für Hylo-Vision® SafeDrop® Daily liegen keine klinischen Daten für die Anwendung an schwangeren Frauen, stillenden Frauen und Kindern vor. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Hylo-Vision® SafeDrop® Daily auftreten?

Unmittelbar nach der Anwendung können in seltenen Fällen vorübergehende Symptome wie Irritationen, z.B. Juckreiz, Augenrötungen, leichtes Brennen oder Tränen der Augen sowie lokale allergische Reaktionen, Fremdkörpergefühl, Verkrustungen der Augen, geschwollene Augenlider und Schmerzen der Augen auftreten. Des Weiteren kann nach der Anwendung vorübergehend eine Beeinträchtigung der Sehschärfe (Schleiersehen) eintreten. In diesem Fall sollte kein Fahrzeug gelenkt und keine Maschinen bedient werden. Es empfiehlt sich zu warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.

Wie werden Nebenwirkungen gemeldet?

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle an die OmniVision GmbH und der zuständigen Behörde (in Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM); in Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)).

Was ist bei einer Überdosierung zu beachten?

Hylo-Vision® SafeDrop® Daily kann nicht überdosiert werden.


Welche Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind zu beachten?

- Hylo-Vision® SafeDrop® Daily ist nur für den äußerlichen Gebrauch am Auge bestimmt und dient nicht zur oralen Einnahme.
- Hylo-Vision® SafeDrop® Daily sollte nur bei den genannten Indikationen angewendet werden.
- Bei Beschädigungen des Sicherheitssiegels der Faltschachtel oder des Mehrdosenbehältnisses soll Hylo-Vision® SafeDrop® Daily nicht verwendet werden.
- Das Auge mit der Tropferspitze nicht berühren, um Infektionen oder Verletzungen des Auges zu vermeiden.
- Die Tropferspitze darf nicht mit dem Auge, anderen Körperteilen oder anderen Gegenständen in Berührung kommen. Andernfalls sollte die Flasche entsorgt werden, da die Sterilität des Produktes nicht mehr gewährleistet werden kann und das Risiko einer Verkeimung der Tropfen besteht.
- Hylo-Vision® SafeDrop® Daily ist nicht als Aufbewahrungsfähigkeit von Kontaktlinsen geeignet.
- Vor einer Kombination von Hylo-Vision® SafeDrop® Daily mit anderen Augenpräparaten fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Generell sollte zwischen beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen. Hylo-Vision® SafeDrop® Daily sollte nach den anderen Produkten appliziert werden.


- Ein einzelnes Mehrdosenbehältnis darf aus Hygienegründen nicht von mehreren Patienten benutzt werden.
- Hylo-Vision® SafeDrop® Daily ist nicht zur alleinigen Behandlung einer Augeninfektion geeignet. Bei Verdacht auf eine Augeninfektion suchen Sie bitte Ihren Augenarzt auf.
- Bitte konsultieren Sie bei unerwünschten Nebenwirkungen einen Arzt.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses wird auf jeder SafeDrop®-Flasche sowie auf der Faltschachtel angegeben.
- Wenn Ihre Augenbeschwerden während der Anwendung von Hylo-Vision® SafeDrop® Daily andauern, suchen Sie bitte Ihren Augenarzt auf.

Wie wird Hylo-Vision® SafeDrop® Daily angewendet?


Nur für den äußerlichen Gebrauch am Auge. Bitte waschen Sie sich vor jeder Anwendung die Hände.

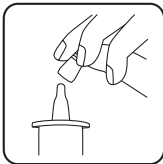

Schritt 1:
Bitte dokumentieren Sie vor der ersten Anwendung das Anbruchsdatum in dem dafür vorgesehenen Feld auf dem Etikett. Vor jeder Anwendung die Schutzkappe abnehmen.

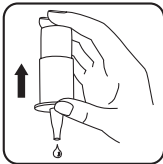

Schritt 2:
Bitte vor der ersten Anwendung der SafeDrop®-Flasche mehrere Druckbewegungen ausführen, bis der erste Tropfen produziert wird. Halten Sie dabei gemäß Abbildung die Flasche kopfüber. Bitte vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Tropferspitze mit den Fingern und dem Auge.

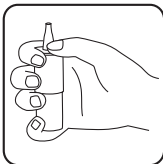

Schritt 3:
Halten Sie die Flasche, wie im Bild dargestellt. Achten Sie darauf, dass der Daumen auf der breiten, ab-rutschsicheren, runden Fingerauflage ruht.



Schritt 4:
Legen Sie nun den Kopf etwas zurück (Nackenposition) und ziehen Sie das Unterlid mit der freien Hand leicht vom Auge ab. Träufeln Sie einen oder zwei Tropfen Hylo-Vision® SafeDrop® Daily in den Bindehautsack jeden Auges ein, in-

dem Sie ein bis zweimal den Pumpmechanismus betätigen. Achten Sie darauf, dass dabei die Flasche senkrecht gehalten wird. Schließen Sie langsam die Augen, so dass sich Hylo-Vision® SafeDrop® Daily gleichmäßig auf der Augenoberfläche verteilen kann.

Sollten Sie selbst nicht in der Lage sein die Augentropfen zu applizieren, bitten Sie jemanden um Hilfe. Alternativ, wenn die Tropfen in Verbindung mit Kontaktlinsen angewendet werden, bringen Sie einen oder zwei Tropfen auf jede Kontaktlinse auf, bevor Sie diese in Ihre Augen setzen, anstatt die Tropfen direkt in Ihre Augen zu geben.

	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Verwendbar bis
	Fertigungslosnummer, Charge
	Temperaturbegrenzung
	Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen

Bitte verschließen Sie die SafeDrop®-Flasche nach der Anwendung mit der Schutzkappe. Bewahren Sie Hylo-Vision® SafeDrop® Daily in der Faltschachtel auf, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Wie oft und wie lange sollte man Hylo-Vision® SafeDrop® Daily anwenden?

Wenden Sie Hylo-Vision® SafeDrop® Daily nach Bedarf oder nach Anweisung des Arztes an. Im Allgemeinen tropfen Erwachsene und Jugendliche 3-mal täglich 1–2 Tropfen Hylo-Vision® SafeDrop® Daily in den Bindehautsack jeden Auges. Das Produkt kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden. Hylo-Vision® SafeDrop® Daily ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie – wie bei allen anderen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen.

Vor einer Kombination Hylo-Vision® SafeDrop® Daily mit anderen Augenpräparaten fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

Augentropfen in 10 ml und 2 x 10 ml SafeDrop® Mehrdosenbehältnissen.

Welche Hinweise zur Lagerung und Entsorgung sind zu beachten?

Bei 5°C bis 25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nach Anbruch der Flasche ist Hylo-Vision® SafeDrop® Daily sechs Monate verwendbar.

Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum finden Sie auf der Flasche sowie auf der Faltschachtel. Hylo-Vision® SafeDrop® Daily kann im Hausmüll entsorgt werden.

Stand der Gebrauchsinformation: Mai 2025

OmniVision GmbH
Lindberghstraße 9
82178 Puchheim, Deutschland
Tel.: +49 89 84 07 92-30
Fax: +49 89 84 07 92-40
www.omnivision.de
E-Mail: info@omnivision.de

0123

Vertrieb Österreich:

OmniVision GmbH
Anton Anderer Platz 6
1210 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 270 70 70
Fax: +43 1 270 70 70-20
www.omnivision.at
E-Mail: info@omnivision.at

	Gebrauchsanweisung beachten
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Medizinprodukt
	Produktidentifizierungsnummer
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Einfaches Sterilbarrieresystem
	Einfaches Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung